

SEGUFIX[®]

病院・介護施設用
転落防止帯
車いす用安全ベルト

総輸入販売元  株式会社 **フロンティア**

パテントピンをパテントボタンに差し込みます。

差し込むと自然にロックされます。約300kgの力に耐えますので、大人が強く引いてもはずれることはありません。

はずす場合は、マグネットキーを使用します。

マグネットキーをパテントボタンの上に乗せれば簡単にはずれます。


ターンボタンの取りはずしには、ターンキーを使用します。

ターンキーをターンボタンの上に乗せて軽くひねれば簡単にはずれます。



パテントボタン・パテントピンとマグネットキー

ターンボタン・ターンピンとターンキー

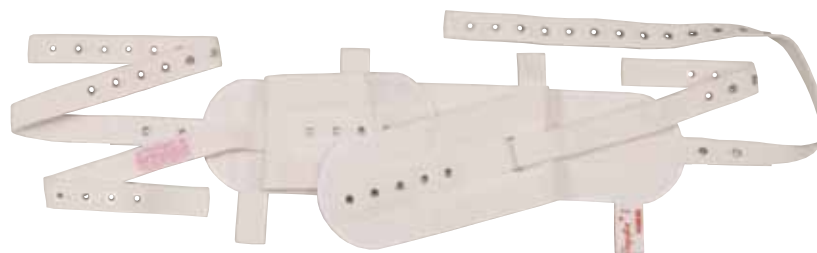

▶ 腹部用ベルト(寝返り調整帯付)

63576000 **¥29,000**

大人用 サイズ (cm) : (腰回り) 70~110

63574610 **¥29,000**

子供用 サイズ (cm) : (腰回り) 45~75

63574810 **¥29,000**

肥満用 サイズ (cm) : (腰回り) 105~145



▶ クラッチ付 腹部用ベルト

63578014 **¥30,400**

サイズ: S 2121/e-S

63578012 **¥30,400**

サイズ: M 2121/e-M

63578013 **¥30,400**

サイズ: L 2121e/L

●従来の腹部用にクラッチが付く事により下方への身体のズレを防止します。

●サイズは腹部用ベルトと同じです。



▶ ムートン付腹部用ベルト

63578015 **¥32,800**

サイズ: M 2101/ef-M

63578016 **¥32,800**


サイズ: L 2101/ef-L

●腹部ムートン (ポア) 付により体圧分散性、ズレ摩擦の軽減

●除湿機能

●通気性、断熱性にも優れ、夏は涼しく、冬は暖かい素材です。

●サイズは腹部用ベルトと同じです。

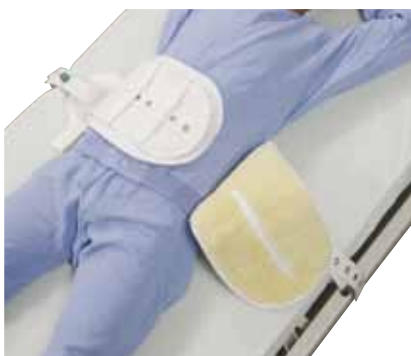

▶ ムートンカバー腹部用

63578018 8012-M **¥10,400**

●体圧分散性、ズレ摩擦の軽減

●除湿機能

●通気性と断熱性にも優れ、夏は涼しく、冬は暖かい素材です。



▶ トランスポートバッグ

63578021 8014

¥6,000

- 保管、収納
- 持ち出し時等に役立ちます。



▶ バッグ

63578020 8015

¥4,560

- 保管、収納
- 持ち出し時等に役立ちます。



▶ パテントボタンセット

63574270

¥1,500

セット内容

パテントボタン

パテントピン

合計

- 使用にはマグネットキーが必要です。

▶ パテントボタン

63574310

¥1,000

▶ パテントピン

63574311

¥500

▶ マグネットキー

63574280

¥1,500



▶ ターンボタンセット

63577300

¥2,800

セット内容

ターンボタン

ターンピン

合計

- 使用にはターンキーが必要です。

▶ ターンボタン

63577700

¥1,800

▶ ターンピン

63577100

¥1,000

▶ ターンキー

63577200

¥1,750

●ご注意/パテントボタン・パテントピンとターンボタン・ターンピンに互換性はありません。
取り外しにはそれぞれマグネットキーとターンキーが必要です。



▶ 車イス用安全ベルトセット [3031]

63574400

¥26,110

セット内容

バックレストベルト 63574410

¥13,055×1個

腰ベルト 63574420

¥13,055×1個

合計

¥26,110

- 適用サイズ/腰まわりが70~110cmの方

サイズ (W×L) cm: (腰ベルト) 13×122 (バックレストベルト) 18×167



▶ 車イス用サスペンダー

63578007

¥13,300

- バックレストベルトが必要となります。

ご使用上の注意

- 1 セグフィックスは患者さんの人権を尊重し、患者さんができるだけ自由に体を動かせる状態で、安全を確保することを目的に開発された商品です。そのため、強度な固定を必要とする方にはお勧めできません。
- 2 セグフィックスは患者さんの状況に合わせて調節・固定する部位と程度を選ぶことができます。使用状況を見て、必要と思われる部位をご使用ください。
- 3 商品の性格上、患者さんが非常に強い動きをされる場合がありますので、時折点検を行い、部品が傷んでいる場合は早めに交換を行ってください。
- 4 破損の程度によっては、修理できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。パテントボタン等部分的に破損した場合には、必要部分のみの販売も行っております。
- 5 セグフィックスは販売先を医療関係施設に限っております。必ず医師の監督の下でご使用ください。上記以外の場所（在宅・その他）ではご使用にならないでください。そのような場所でのご使用による事故等につきましては、弊社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 6 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、製品の扱い方をご理解の上でご使用ください。事故等の防止のため、記載されている危険・注意事項をお守りください。

*セグフィックスの強度について

- *パテントボタン強度……コベルコ科研にて検査（3セット）
 - ①2.730N（278 kg（f））
 - ②2.773N（283 kg（f））
 - ③2.849N（290 kg（f））
- *ターンボタン強度……コベルコ科研にて検査（3セット）
 - ①6.987N（712 kg（f））
 - ②6.767N（690 kg（f））パテントボタンより約2.4倍の強度です。
 - ③6.910N（705 kg（f））

*マグネットキーの磁力

370mt/min

●お求めとお問い合わせは

総輸入販売元



株式
会社

フロントティア

本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目25番7号
TEL.03-5807-7721 FAX.03-5807-7722
<http://www.frontier-med.co.jp>

洗濯をする場合のご注意



95℃までの温度で洗濯できます。



漂白剤はお使いにならないでください。

本人や他の利用者などの生命、身体を保護するため、緊急やむを得ない場合以外には使用しないでください。

*洗濯方法及び漂白方法について

- (北海道大学大学院情報科学研究科 生体システム工学部)
- *洗濯の方法および洗剤の選定について
血液、汗・体液、小便・大便が付着した場合、酵素が入った洗剤等を用いて、体温（37℃）以下のぬるま湯で、つけ洗い、あるいはつまみ洗いを行う。
- *漂白剤について
塩素系の漂白剤は綿布であるセグフィックス布部をいためるため使用しないよう。